


1,5 minutes at > 1100 W
3 minutes at 800 - 1100 W
5 minutes at 600 - 750 W

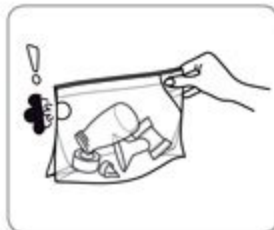

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ EASY CLEAN ПАКЕТ ДЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Применение

1. Непосредственно после использования промойте все детали теплой мыльной водой, после этого ополосните в чистой воде.
2. Налейте 60 мл (2 унции) воды в пакет.
3. Положите детали, которые необходимо очистить с помощью пара, в пакет. Плотно закройте его.
4. Поставьте пакет в микроволновую печь в центр поворотного круга.
5. Установите желаемую мощность и время, после чего начните процесс стерилизации:
 - 1,5 минут при мощности > 1100 Вт;
 - 3 минуты при мощности 800-1100 Вт;
 - 5 минут при мощности 600-750 Вт.
6. Откройте микроволновую печь после завершения процесса и дайте пакету остыть в течение минимум 2 мин.
7. Используя рукавицу для печи или прихватку, осторожно извлеките пакет из микроволновой печи.
8. Держите пакет на безопасном от себя расстоянии, осторожно вылейте оставшуюся воду через отверстие для выпуска пара.
9. Откройте пакет и достаньте очищенные паром детали.
10. Пакет может быть использован до 20 раз. С целью собственного контроля ставьте галочку в клеточках после каждого применения пакета.

Предупреждение!

- Всегда наполняйте пакет минимум на 60 мл (2 унции) питьевой воды, невыполнение этого условия может привести к повреждению деталей.
- Не переполняйте пакет.
- Никогда не помещайте пакет на металлический гриль микроволновой печи.
- Не превышайте рекомендованное время стерилизации, в противном случае детали могут деформироваться.
- Если микроволновая печь без поворотного круга, установите половину рекомендованного времени.
- **Осторожно: при вынимании пакета из микроволновой печи и его открытии возможна утечка горячей воды или пара.**
- Используйте пакет только с устойчивыми к воздействию микроволн деталями.
- Нельзя использовать пакет в духовых печах, а также в режиме «гриль».